

ノロウイルス 拭き取り検査（環境）

ノロウイルスによる食中毒事件が近年、多発しています。

人の手指などを介し、厨房内の調理台、調理器具、ドアノブ、トイレ、手すりなどの環境を汚染していきます。

衛生的な管理が適切に行われているかどうかを「ノロウイルス拭き取り検査」で確認しませんか？

拭き取り箇所の一例

拭き取り検査で
洗浄・消毒の状況を
確認しましょう!!



イメージキャラクター
「うおっち博士」



ドアノブ



トイレ



調理台・調理器具

【検査料金 [税別]】

1 ~ 9 検体 **¥7,000**/1 検体

10 ~ 49 検体 **¥5,000**/1 検体

おすすめ 50 検体以上 **¥3,500**/1 検体

【報告納期】

2 営業日~

※受付状況、器材等の在庫状況、ご依頼いただいた検体数等により、報告納期が異なる場合がございます。

※「拭き取りキット」の送付をご希望される方は、申込みの際に「キット必要数」をお申し付け下さい。

お気軽にお問い合わせ下さい…

株式会社札幌市中央卸売市場食品衛生検査センター

〒060-0012 北海道札幌市中央区北 12 条西 20 丁目 1-10 カネシメ冷蔵 (株) 2F

TEL 011 (618) 2263 FAX 011 (618) 2264 HP www.eiseikensa.com


[拭き取りキットによる採取方法について]

1) 拭き取りキットの綿棒キャップを取りだし、容器内にある溶液を全て捨ててください

2) 綿棒キャップを持って、検体表面 100cm²[縦 10cm × 横 10cm]


(以下の①～④の範囲を参考下さい) を拭き取ってください (力加減は一定に!!)

※綿棒に手指が触れないように注意してください

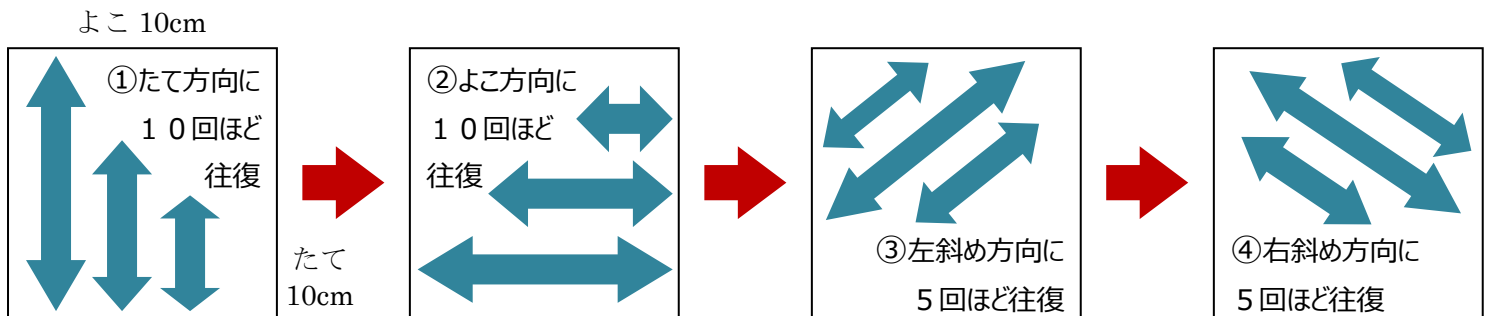

3) 拭き取った綿棒キャップを戻し、容器を指でつまみ、綿球を絞って下さい

※綿球の湿り気が無くなるまで絞り切して下さい

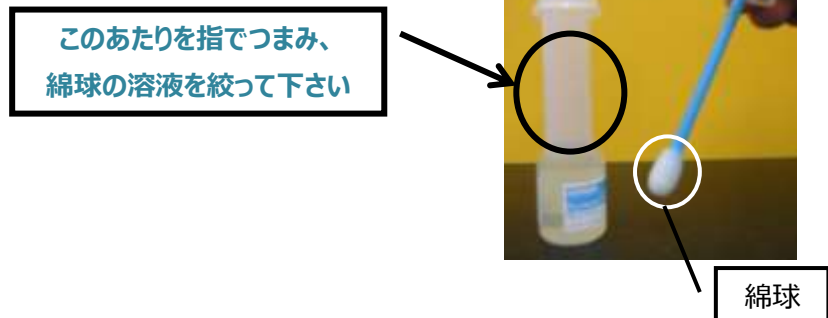

4) もう一度、2)および 3)の操作を行なって下さい

5) 綿棒キャップを容器に戻し、キャップを閉め、冷凍状態にて発送またはお持ち込み下さい

※拭き取りキットを送付いたしますので、お申込み時に拭き取り箇所をお伝えください※

※採取方法や操作にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください※